

添付文書

**2021年4月改訂（第4版）
*2018年10月改訂（第3版）

医療機器届出番号 26B2X10027V01003

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

再使用禁止

バーメッド シルバーレスト（心電図検査向け）


*【禁忌・禁止】

使用方法

- 本製品は DISPOSABLE 品のため、再使用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

A10022-J (100)

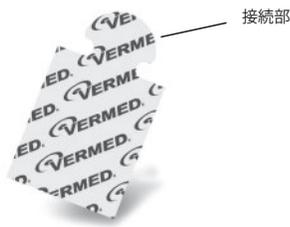

タイプ名	寸法 (mm)
A10022-J (100)	34.5×22.9

仕様

DC オフセット電圧 100mV 以下
AC インピーダンス 3kΩ 以下 (10Hz)

【使用目的又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用方法等】

- 装着部の決定
傷口や炎症のある部位、凹凸部を避けて、装着部を決定してください。
- 皮膚の前処理
装着部を清潔にし、汗、水分、皮脂分を、乾いたガーゼ、アルコール綿などで十分に拭き取り、必要に応じて、除毛等を行ってください。
- 電極の貼付
包装から電極を取り出し、片側から押し当てるようにして装着部に貼り付けてください。
リード線のクリップを電極の接続部に取り付けてください。
- 使用後
皮膚の損傷を最小限に抑えるよう、電極の端からゆっくりと剥がしてください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 傷口、炎症、皮膚障害のある部位への装着は行わないでください。
- 使用中、皮膚に発赤、腫れ等の症状が現れた場合は、使用を中止してください。
- 他の型式の電極と一緒に使用しないでください。[基線が不安定になるおそれがあります]
- 包装が破損している場合は使用しないでください。
- 開封後は早めにご使用ください。
- 装着部位を清拭した後は、皮膚が乾燥していることを確認して、電極を貼ってください。[電極が剥がれるおそれがあります]
- リード線のクリップを電極の接続部に取り付けるときは、クリップがゲルに触れないようにご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

有効期間

製造日より 24 ヶ月 [自己認証 (当社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

NISSHA 株式会社
電話：0120-248-506

製造業者

Graphic Controls Acquisition Corp. (アメリカ合衆国)